


OTOSAN® NASAL SPRAY Forte

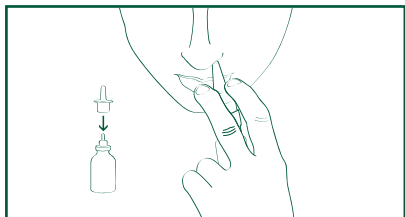

SLO

**2,2% HIPERTONIČNA RAZTOPINA
MORSKE VODE IZ BRE TANJE, Z
RASTLINSKIMI IZVLEČKI ALOJE IN ČRNEGA
RIBEZA TER ETERIČNIMI OLIJI PLANINSKEGA
BORA, ČAJEVCA IN LIMONE.**

UPORABA. Pršilo za nos Otosan® Nasal Spray Forte je medicinski pripomoček namenjen odmašitvi nosu. Deluje lokalno, čisti nosno votlino in tako odpravlja zamašenost nosu ter preprečuje vnetja in razvoj okužb. Pršilo za nos Otosan® Nasal Spray Forte je hipertonična (2,2-odstotna) raztopina morske vode, obogatena z rastlinskimi izvlečki in eteričnimi olji ekološko pridelanih rastlin. Steklenička ne vsebuje potisnih plinov.

INDIKACIJE. Uporaba pršila za nos Otosan® Nasal Spray Forte je priporočljiva kot prvo pomožno zdravljenje v primeru vnetja sinusov in v primeru vnetnih stanj kot sta prehlad in rinitis ter za nego po kirurškem posegu.

ODMERJANJE. 1–2 vpiha v vsako nosnico do 4-krat na dan.

OPIS. Hipertonična raztopina povzroči ob stiku z zamašeno nosno sluznico vodeni izcedek katerega prekomerno količino zmanjša z osmozo. Nakopičeno sluz redči tako, da jo utekočini. Prispeva tudi k normalizaciji edematoznih celic. Zmanjšana viskoznost sluznice pospešuje izločanje sluzi in prispeva k izločanju virusov, bakterij, cvetnega prahu ter makro in mikro delcev. Z izločanjem prekomernega izcedka in izboljšanjem stanja sluznice s pomočjo naravnih snovi, ki jih pršilo vsebuje ustvarjajo neugodno okolje za razvoj bakterij (ali mikrobov). Pršilo za nos Otosan® Nasal Spray Forte lajša simptome boleznin ter preprečuje njihov ponovni pojav.

TOLERANTNOST. Pršilo za nos Otosan® Nasal Spray Forte ne vsebuje vazokonstriktorjev. Zaradi naravnega delovanja organskih rastlinskih izvlečkov in eteričnih olj pršila, ga uporabniki dobro prenašajo, saj ne povzroča odvisnosti ali tveganja za pojav medikamentoznega rinitisa.

NAVODILA ZA UPORABO. Pred uporabo se useknite. Raztopino hitro in energično vpihnite v vsako nosnico, globoko vdihnite, pri tem pa držite glavo pokonci. Nato globoko vdihnite z zaprtimi usti in s prstom rahlo pritisnite na drugo nosnico, da omogočite enakomerno razporeditev raztopine po celotni nosni sluznici. Po uporabi sperite nastavek s toplo vodo in ga osušite z papirnatim robčkom.

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI. Uporabljajte pri sobni temperaturi (20–25 °C). Stekleničke ne izpostavljajte virom toplote. Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 12 let. Hranite otrokom nedosegljivo. Samo za zunanjo uporabo. Preprečite stik z očmi. Ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti na katero koli izmed sestavin izdelka. Ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti na rake in/ali mehkužce. Izdelka ne zaužijte. Izdelek uporabljajte samo v skladu s temi navodili za uporabo in samo v namene, ki jih je opredelil proizvajalec. Steklenička je namenjena izključno

uporabi ene osebe, saj lahko v nasprotnem primeru prenaša okužbe.

Trenutno ne obstajajo podatki o znanih kontraindikacijah sestavin pršila za nos Otosan® Nasal Spray Forte ob uporabi izdelka med nosečnostjo ali dojenjem. V primeru neželenih učinkov prekinite zdravljenje.

NEŽELENI UČINKI. Trenutno ni znanih neželenih učinkov.

IZDELEK NAMENJEN TEMELJITEMU ČIŠČENJU IN ODMAŠTIVI NOSNE VOTLINE.

MORSKA VODA (KONCENTRAT)

= ČISTI IN MEHČA

Morska voda iz morja, v bližini Bretanje, katere sestava je podobna človeški krvni plazmi, je izjemno bogata z mineralnimi hranili in oligo elementi, ki so pomembni za naše telo. Poleg čiščenja nosne votline ter odstranjevanja prahu in cvetnega prahu hipertonična morska voda izloča odvečno sluz.

GLICERINSKI IZVLEČEK ČRNEGA RIBEZA

= POMIRJA

Črni ribez slovi po blagodejnem delovanju in kortizonu podobnem učinku.

SUHI IZVLEČEK ALOJE

= ŠČITI IN VLAŽI

Polisaharidi v sluznični membrani tvorijo zaščitni sloj, ki ščiti sluznico pred dražječimi snovmi in mikroorganizmi.

ETERIČNO OLJE PLANINSKEGA BORA

= DELUJE BALZAMIČNO

Vdihavanje eteričnega olja planinskega bora spodbuja redčenje in izločanje sluzi. Zato je uporaba izdelka priporočljiva za pomožno zdravljenje prehlada, vnetja sinusov, gripe, kašlja, vnetja grla, akutnega in kroničnega bronhitisa, simptomov gripe in astme.

ORGANSKO ETERIČNO OLJE ČAJEVCA

= ČISTI

Eterično olje čajevca služi predvsem odstranjevanju bakterij, virusov in glivic iz nosne votline. Poleg tega olje čajevca preprečuje razmnoževanje vnetnih celic.

ORGANSKO ETERIČNO OLJE LIMONE

= ČISTI

Limona nudi zaščito pred zunanji vplivi, kot so mikrobi in bakterije.

Pršilo za nos Otosan® Nasal Spray Forte je medicinski pripomoček z oznako CE. Ocena skladnosti zagotavlja, da pripomoček izpolnjuje zahteve Direktive Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih.

V skladu s predpisi o razvrščanju iz Priloge IX evropske direktive je izdelek uvrščen v razred I. Pršilo za nos Otosan® Nasal Spray Forte lahko odvržete med gospodinjske odpadke.

1259 | REV.1.05/09/2019

 **OTOSAN S.r.l.**

Via degli Scavi, 32 - 47122 Forlì - Italy

Tel. +39.0543.795379 - otosan@otosan.com - www.otosan.com

